

Anleitung Nasen-Stechen

STUDEX NASENSTECH-INSTRUMENT

WICHTIG

1. Verwenden Sie Nasenstecker NUR ZUM NASENSTECHEN.
2. Versuchen Sie nicht die Nasenwand (den Knorpel in der Nase) mit diesem Gerät zu stechen.
3. Sie können zum stechen nur die weisse Cartridge mit dem Nasenstecker verwenden (wie rechts grafisch dargestellt) oder die Cartridge in Verbindung mit dem Stechinstrument System 75 verwenden.

BITTE LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANLEITUNG SORGFÄLTIG BEVOR SIE ANFANGEN!

1. Entscheiden Sie, wo Sie das Nasenloch stechen wollen. Wir empfehlen die Stelle, die in Abb. 1 markiert ist.
2. Reinigen Sie Ihre Hände und säubern Sie dann den Nasenflügel von außen mit den sterilen MediSept™ Alkoholtupfern oder der MediSept™ Ear Care Lotion (Abb. 2).
3. Markieren Sie die gewünschte Stelle mit dem ungiftigen Markierstift von MediSept (Abb. 3).
4. Öffnen Sie die sterile Verpackung und entnehmen Sie das STUDEX Einweg-Stechgerät.
5. Richten Sie das Gerät an der markierten Stelle aus (der kleine Vorsprung gegenüber dem Stecker wird in der Nase platziert und Ihr Daumen befindet sich nahe der Nasenwand). S. Abb. 4.
6. Pressen Sie das Gerät vorsichtig bis zum Widerstand zusammen (Abb. 5). Die Steckerspitze berührt die markierte Stelle. Das Gerät sollte sich im rechten Winkel zum Nasenflügel befinden.
7. Zum Stechen pressen Sie das Gerät fest zusammen (Abb. 6). Der Stecker wird in kürzester Zeit durch den Nasenflügel gestochen.
8. Lassen Sie das Gerät in die Ausgangsstellung zurückgleiten (Abb. 7) und ziehen Sie es NACH UNTEN von der Nase WEG wie in Abb. 8 gezeigt.

