

Stechanleitung

So funktioniert's: einfach – sicher – hygienisch – schnell



1 Lassen Sie Ihren Kunden den gewünschten Erstecker auf dem Muster-Display auswählen.



2 Erklären Sie Ihren Kunden den Stechvorgang und lassen Sie die Einverständniserklärung unterzeichnen.



3 Desinfizieren Sie die Ohrfläpchen von beiden Seiten gründlich mit dem Alkoholtupfer.



4 Markieren Sie mit dem Studex-Markierstift die Stelle, an welcher das Ohr durchstochen werden soll.



5 Lassen Sie Ihren Kunden die markierte Stelle im Spiegel betrachten und zustimmen.



6 Entfernen Sie die Markierung leicht, so dass sie noch schwach sichtbar ist.



7 Trennen Sie die beiden Blisterverpackungen an der vorgesehenen Perforation ab. Entfernen Sie das Siegpapier der Blisterverpackung – entnehmen Sie jedoch die Kartusche **NICHT** aus der Blisterverpackung.



8 Halten Sie die Kartusche mit der Blisteröffnung nach unten und drücken Sie die Kartusche in die Halterung des Instruments. Achten Sie darauf, dass der Teil mit der Pousette zuerst einrastet.



9 Danach drücken Sie das hintere Teil der Kartusche in die Halterung des Instruments und nehmen die Blisterverpackung ab – werfen Sie diese jedoch nicht weg, denn sie wird im Punkt 13 wiederverwendet.



10 Positionierung: Richten Sie die Ohrstecker- spitze auf die markierte Stelle und drücken Sie das Instrument leicht zu, um die Ohrstecker- spitze präzise auf der markierten Stelle zu positionieren.



11 Stechvorgang: Wenn Sie mit der Positionierung zufrieden sind, drücken Sie das Instrument **BIS ZUM ANSCHLAG** durch. Die Pousette wird automatisch auf dem Stecker positioniert.



12 Lösen Sie den Druck vom Instrument, es kehrt in seine Ausgangsposition zurück, und ziehen Sie es vorsichtig senkrecht nach unten ab.



13 Setzen Sie die Blisterverpackung wieder auf die Kartusche. Indem Sie die Kartusche mit der Blisterverpackung nach vorne drücken, können Sie die Kartusche aus der Halterung des Instruments lösen.



14 Entnehmen Sie die Kartusche mit der Blisterverpackung aus der Halterung des Instruments und werfen Sie beides weg.



15 Tragen Sie auf der Vorder- und Rückseite des Ohrlochs ein Studex Pflege Produkt auf und beraten Sie Ihren Kunden über die Nachpflege innerhalb der ersten 6 Wochen.